

CR Phosphor Plate Cleaner

zur Reinigung von CR MD4.0 Speicherfolien



Reinigung

Stellen Sie sicher, dass die Speicherfolie nach der Reinigung wieder in dieselbe Kassette eingesetzt wird.

Verwenden Sie zum Reinigen der Agfa Speicherfolie ausschließlich den ‚CR Phosphor Plate Cleaner‘ und ein fusselfreies, weiches Tuch (zum Beispiel: Agfa Polynit Wipes).

WIE?

Feuchten Sie das Tuch mit ‚CR Phosphor Plate Cleaner‘ an, und wischen Sie vorsichtig und gleichmäßig über die Folienoberfläche (phosphorhaltige Seite und Rückseite).

Lassen Sie die Folienoberfläche etwa zehn Minuten trocknen, damit sich die Lösungsmittel verflüchtigen können.

Reinigen Sie auch die Kassette gründlich. Verwenden Sie hierzu ein trockenes Tuch, oder blasen Sie Staub mit Druckluft ab.

Verwenden Sie keinen Folienreiniger zum Reinigen der Kassetten-Innenflächen!

Sobald die Folienoberfläche trocken ist (nach circa zehn Minuten), prüfen Sie die Folie nochmals auf Staubpartikel und sonstige Unreinheiten, bevor Sie diese in die Kassette einsetzen.

WANN?

Mindestens einmal pro Monat oder wenn auf den Röntgenbildern Partikel zu erkennen sind.

Wenn die Betriebsumgebung äußerst staubig oder sehr trocken ist, muss die Reinigung ebenfalls häufiger vorgenommen werden. (Der ‚CR Phosphor Plate Cleaner‘ enthält staubabweisende Mittel zur Verringerung der statischen Aufladung und Staubansammlung).

Bei Bedarf können Sie die Außenseite der CR-Kassetten mit enthärtetem Wasser und Seife reinigen. Die Innenseite der CR-Kassette sollte nicht mit flüssigen Mitteln gereinigt werden.

Reinigen Sie die Kassette unter keinen Umständen mit Ethylalkohol, Methylalkohol oder Diethylether!

Reinigungsmittel



‚CR Phosphor Plate Cleaner‘ ist ein einfach anzuwendendes, ethanolbasiertes Reinigungsmittel, das eine lange Lebensdauer und hohes Leistungsvermögen Ihrer Speicherfolien sicherstellt.

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Agfa Speicherfolien ausschließlich den Agfa CR Phosphor Plate Cleaner.

Bezugsquellen

Agfa Healthcare Germany GmbH | T +49 211 22986 444
 Agfa NV, Zweigniederl. Österreich | T +43 1 89966 555
 Agfa, Zweigniederlassung Schweiz | T +41 44 823 7423

- [CR Phosphor Plate Cleaner](#)
Bestellnummer: 10+9999911970
- [Polynit Wipes \(75 Stück\)](#)
Bestellnummer: 10+9999912730

Alternativ kann der CR Phosphor Plate Cleaner auch über den autorisierten Fachhändler bezogen werden. Artikelnummer EQP6D für zwei Flaschen, EFOJH für vier Flaschen, sowie 5PCZF für Agfa Polynit Wipes Tücher.