

# PROSAT PS-911 Feuchttücher

## zur Reinigung von CR MM3.0 Speicherfolien



### Reinigung

Stellen Sie sicher, dass die Speicherfolie nach der Reinigung wieder in dieselbe Kassette eingesetzt wird.

Verwenden Sie ausschließlich PROSAT PS-911 Feuchttücher zum Reinigen von Agfa CR MM3.0 Speicherfolien.

### WIE?

Wischen Sie vorsichtig und gleichmäßig über die Folienoberfläche (phosphorhaltige Seite und Rückseite).

Lassen Sie die Folienoberfläche etwa zehn Minuten trocknen, damit sich die Lösungsmittel verflüchtigen können.

Reinigen Sie auch die Kassette gründlich. Verwenden Sie hierzu ein trockenes Tuch, oder blasen Sie Staub mit Druckluft ab.

Verwenden Sie keinen Folienreiniger zum Reinigen der Kassetten-Innenflächen!

Sobald die Folienoberfläche trocken ist (nach circa zehn Minuten), prüfen Sie die Folie nochmals auf Staubpartikel und sonstige Unreinheiten, bevor Sie diese in die Kassette einsetzen.

### WANN?

Mindestens einmal pro Monat oder wenn auf den Mammographieaufnahmen Partikel zu erkennen sind. Wenn die Betriebsumgebung äußerst staubig oder sehr trocken ist, muss die Reinigung ebenfalls häufiger vorgenommen werden.

Bei Bedarf können Sie die Außenseiten der CR-Kassetten mit enthärtetem Wasser und Seife reinigen. Die Innenseiten der CR-Kassette sollte nicht mit flüssigen Mitteln gereinigt werden.

Reinigen Sie die Kassette unter keinen Umständen mit Ethylalkohol, Methylalkohol oder Diethylether!

### Reinigungsmittel

PROSAT PS-911 Feuchttücher sind einfach anzuwendende Reinigungstücher, die zu 70 % mit Ethylalkohol und zu 30 % mit destilliertem Wasser angefeuchtet sind.



Die Reinigung der CR MM3.0 Folien mit diesen Reinigungstüchern stellt eine lange Lebensdauer und ein hohes Leistungsvermögen Ihrer Mammographiespeicherfolien sicher.

Reinigen Sie die CR MM3.0 Speicherfolien auf keinen Fall mit Agfa CR Phosphor Plate Cleaner! Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Mammographiespeicherfolien ausschließlich PROSAT PS-911 Feuchttücher („PROSAT PS-911 ETOH Wipers“).

### Bezugsquellen

Agfa Healthcare Germany GmbH | T +49 211 22986 444  
 Agfa NV, Zweigniederl. Österreich | T +43 1 89966 555  
 Agfa, Zweigniederlassung Schweiz | T +41 44 823 7423

PROSAT PS-911 Feuchttücher  
 Bestellnummer: 10+9999912190

Alternativ können die PROSAT PS-911 Feuchttücher unter der Artikelnummer ETRTM (3 x 30 Feuchttücher) über den autorisierten Fachhandel bezogen werden.